



BRASSELER
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

ENDOSEQUENCE^{MD}

BC SEALER^{MC} & BC SEALER HIFLOW^{MC}


LES PRODUITS DE SCÈLEMENT MODERNES POUR OBTURATIONS
ENDODONTIQUES SONT MAINTENANT OFFERTS POUR LES
TECHNIQUES À CHAUD!

Les cliniciens peuvent désormais choisir entre deux formulations différentes du même produit de scellement pré-mélangé éprouvé. Comparé au produit de scellement BC Sealer, BC Sealer HiFlow présente une viscosité plus faible lorsqu'il est chauffé et est plus radio-opaque, ce qui l'optimise pour les techniques d'obturation à chaud.

BC Sealer 2g

N° de commande : 5017560U0

- Technique exigeant un produit de scellement
- Optimal pour les obturations à froid

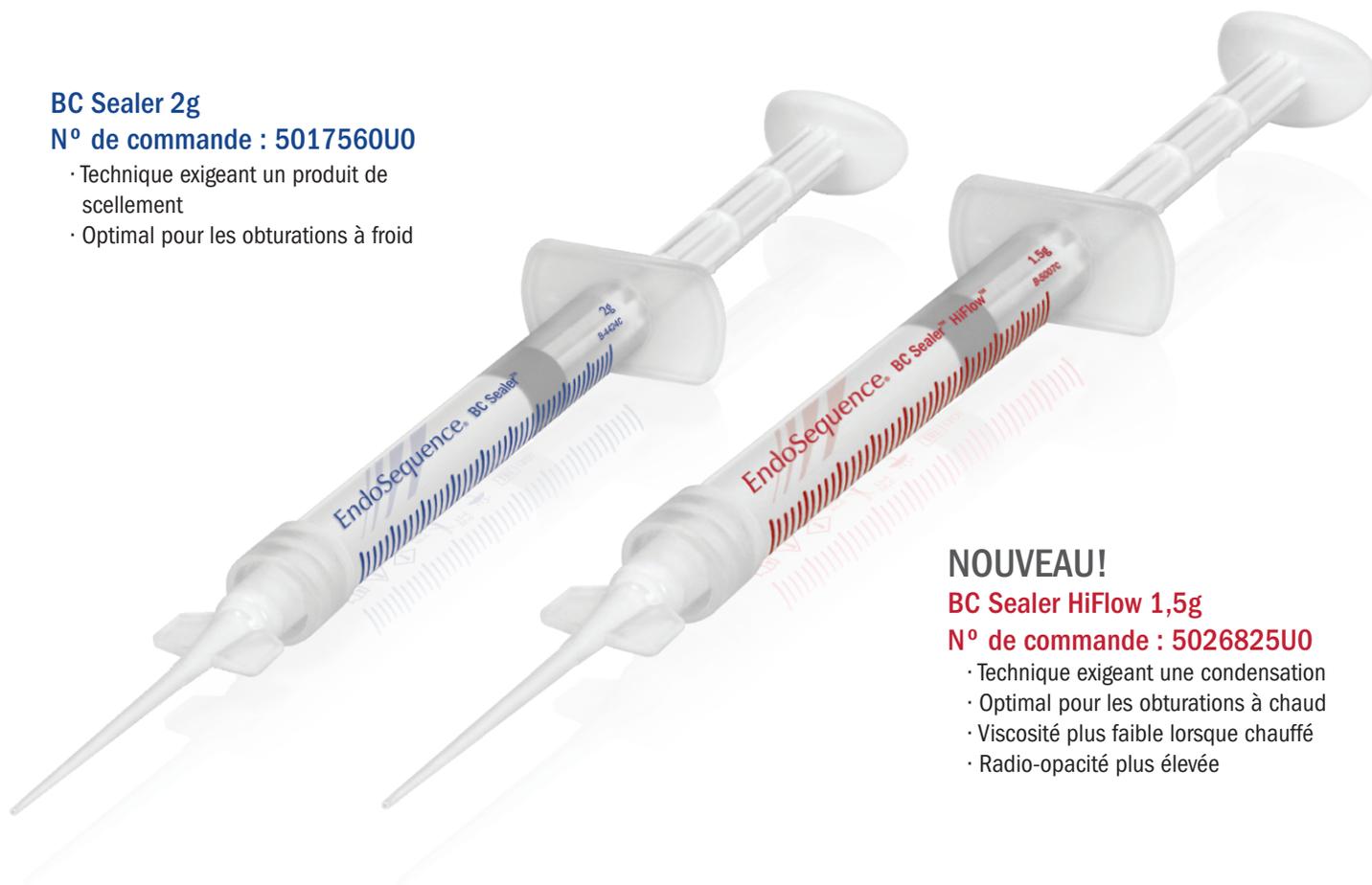

NOUVEAU!


BC Sealer HiFlow 1,5g

N° de commande : 5026825U0

- Technique exigeant une condensation
- Optimal pour les obturations à chaud
- Viscosité plus faible lorsque chauffé
- Radio-opacité plus élevée



OBTURATION BIOCÉRAMIQUE ADHÉRENTE

La gutta percha standard peut être utilisée avec le BC Sealer mais, pour obtenir un joint vraiment étanche, les pointes BC Points sont recommandées. Les pointes BC Points sont imprégnées et enduites de particules biocéramiques qui lui permettent d'adhérer au BC Sealer. L'avantage d'utiliser BC Sealer avec les pointes BC Points est que cela permet de réaliser une obturation adhérente tridimensionnelle à la température ambiante. Toutefois, si une technique verticale à chaud est préférée, il est recommandé d'utiliser BC Pellets à une température de 150 °C à 220 °C.

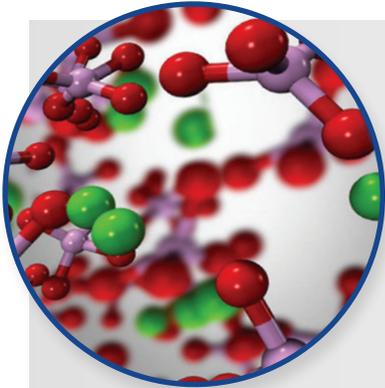

PRISE/RÉACTION D'ADHÉRENCE DU BC SEALER

BC Sealer est un produit de scellement à base de silicate de calcium et de phosphate de calcium. Le silicate de calcium combiné avec de l'eau forme de l'hydroxyde de calcium (pH élevé). L'hydroxyde de calcium se combine alors avec le phosphate de calcium pour former l'hydroxyapatite.

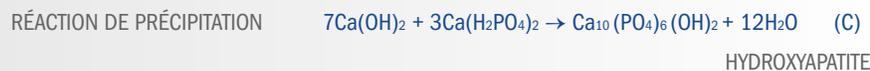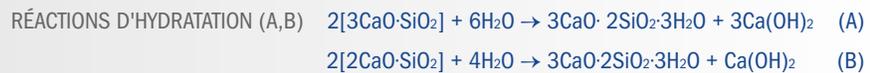

OBTURATION ADHÉRENTE À FROID

- BC Sealer
- BC Points



EndoSequence BC Points™
 Emballages individuels (60/pqt)

✓ *Pointe plus rigide pour appliquer le scellant*

Code couleur	Dim. de l'embout	conicité 0,04	conicité 0,06
○ Blanc	15	5019508U0	5019520U0
● Jaune	20	5019509U0	5019521U0
● Rouge	25	5019510U0	5019522U0
● Bleu	30	5019511U0	5019523U0
○ Vert	35	5019512U0	5019524U0
● Noir	40	5019513U0	5019525U0
○ Blanc	45	5019514U0	5019526U0
● Jaune	50	5019515U0	5019527U0
● Rouge	55	5019516U0	-
● Bleu	60	5019517U0	-
○ Vert	70	5019518U0	-
● Noir	80	5019519U0	-

OBTURATION ADHÉRENTE À CHAUD

- BC Sealer HiFlow
- BC Points série 150 & BC Pellets



EndoSequence BC Points™ série 150
 Emballages individuels (60/pqt)

✓ *Fond à 150 °C*

Code couleur	Dim. de l'embout	conicité 0,04
○ Blanc	15	5024583U0
● Jaune	20	5024584U0
● Rouge	25	5024585U0
● Bleu	30	5024586U0
○ Vert	35	5024587U0
● Noir	40	5024588U0
○ Blanc	45	5024589U0
● Jaune	50	5024590U0

BC Pellets (100/pqt)

✓ *Fond à 150 °C*

N° de commande 5023074U0



Consultez notre site web BrasselerCanada.com
 Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

