



BRASSELER
CANADA®

TROUSSE DE POLISSAGE ET D'AJUSTAGE AU FAUTEUIL

IPS e.max^{MD}

UNE EXCLUSIVITÉ DE BRASSELER CANADA



VOTRE ALLIÉ



LD15M Meule LD rose (grain moyen)

- Meulage rapide et efficace de la zone d'attache de la tige de positionnement
- Ajustage des parois axiales ou des cuspides lorsque des modifications importantes de leur contour sont requises
- Meulage à faible vitesse (5 000 tr/min) des bords trop épais



R17MLD Meule rouge Dialite^{MD} LD (grain moyen)

- Recommandée pour l'élimination extra-buccale des rayures produites par les instruments diamantés
- Principalement utilisée sur les parois axiales, les contacts proximaux et les cuspides




R17FLD Meule jaune Dialite^{MD} LD (grain fin)

- Utilisation extra-buccale recommandée pour donner un poli brillant aux surfaces des parois axiales, des contacts proximaux et des cuspides
- Utilisée après la meule rouge Dialite LD (grain moyen)



H2MLD Pointe rouge Dialite^{MD} LD (grain moyen)

- Recommandée pour l'élimination extra-buccale des rayures produites par les instruments diamantés
- Principalement utilisée sur les surfaces occlusales et les structures profondes

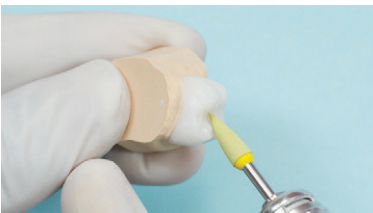


H2FLD Pointe jaune Dialite^{MD} LD (grain fin)

- Utilisation extra-buccale recommandée pour donner un poli brillant aux surfaces occlusales et aux structures profondes
- Utilisée après la pointe rouge Dialite LD (grain moyen)



FL26CHP Polissoir Dialite^{MD} Feather Lite^{MC} bleu (gros grain)

- Recommandé pour l'élimination extra-buccale des rayures produites par les instruments diamantés de fraisage et de façonnage
- Outil souple conçu pour préserver les différences entre les surfaces et adapté à toutes les restaurations

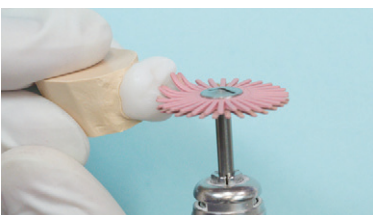

FL26MHP Polissoir Dialite^{MD} Feather Lite^{MC} rose (grain moyen)

- Utilisation extra-buccale recommandée pour donner le poli initial et un fini lustré aux surfaces des restaurations
- Outil souple conçu pour préserver les différences entre les surfaces et adapté à toutes les restaurations
- Utilisé après le polissoir Dialite Feather Lite bleu (gros grain)



FL26FHP Polissoir Dialite^{MD} Feather Lite^{MC} gris (grain fin)

- Utilisation extra-buccale recommandée pour donner le poli final et un fini lustré aux surfaces des restaurations
- Outil souple conçu pour préserver les différences entre les surfaces et adapté à toutes les restaurations
- Utilisé après le polissoir Dialite Feather Lite rose (grain moyen)



8369DF Fraise Dialite^{MD} diamantée ovale (« football ») (grain fin)

- Recommandée pour les ajustages occlusaux intra-buccaux



W17MLD Coupelle intra-buccale Dialite^{MD} LD rouge (grain moyen)

- Recommandée pour la finition et le polissage initial intra-buccale des parois axiales et des surfaces occlusales



W17FLD Coupelle intra-buccale Dialite^{MD} LD jaune (grain fin)

- Utilisation intra-buccale recommandée pour donner un poli brillant aux surfaces des parois axiales, et des surfaces occlusales
- Utilisée après la coupelle rouge Dialite LD (grain moyen)



W16MLD Pointe intra-buccale Dialite^{MD} LD rouge (grain moyen)

- Recommandée pour la finition et le polissage initial intra-buccale des surfaces occlusales




W16FLD Pointe intra-buccale Dialite^{MD} LD jaune (grain fin)

- Utilisation intra-buccale recommandée pour donner un poli brillant aux surfaces occlusales
- Utilisée après la pointe rouge Dialite LD (grain moyen)



K0293 TROUSSE DE POLISSAGE ET D'AJUSTAGE AU FAUTEUIL IPS e.max^{MD}

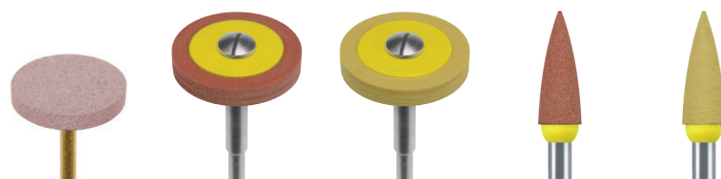

Extra-buccaux

N° de commande	LD15M	R17MLD	R17FLD	H2MLD	H2FLD
Dimension ($\pm_{.10}$ mm)	150	170	170	040	040
Longueur (mm)	3.0	2.5	2.5	13.0	13.0
Grain	Moyen	Moyen	Fin	Moyen	Fin
Mandrin	HP	HP	HP	HP	HP
Plage de vitesses	5 000 tr/min	10 000 tr/min	5 000 tr/min	10 000 tr/min	5 000 tr/min
Quantité	1	1	1	1	1

Stérilisation : autoclave



Extra-buccaux

N° de commande	FL26CHP	FL26MHP	FL26FHP
Dimension ($\pm_{.10}$ mm)	260	260	260
Longueur (mm)	1.0	1.0	1.0
Grain	Gros	Moyen	Fin
Mandrin	HP	HP	HP
Plage de vitesses	10 000 tr/min	7 000 tr/min	4 000 tr/min
Quantité	1	1	1

Stérilisation : autoclave



Intra-buccaux

N° de commande	8369DF	W17MLD	W17FLD	W16MLD	W16FLD
Dimension ($\pm_{.10}$ mm)	025	060	060	040	040
Longueur (mm)	5.5	7.5	7.5	10.0	10.0
Grain	Fin	Moyen	Fin	Moyen	Fin
Mandrin	FG	RA	RA	RA	RA
Plage de vitesses	60 000 tr/min	7 000 tr/min	4 000 tr/min	7 000 tr/min	4 000 tr/min
Quantité	1	1	1	1	1

Stérilisation : autoclave

IPS e.max^{MD} est une marque déposée de Ivoclar Vivadent^{MD}.

► Pour commander, composez le **800-363-3838**



BRASSELER
CANADA[®] VOTRE ALLIÉ